

BEJLISTA

Relax 90s



Kullanım Kılavuzu

Ürün Konsepti

- Uyku aleti, insan vücudunun uyumasına yardımcı olmak için geliştirilen bir tür fizyoterapi aletidir.
- İnsanların iyi bir uyku uyumalarına yardımcı olmak için, elektromanyetik dalgaları ve diğer teknolojileri kullanarak insanın biyolojik dalgalarını taklit eder.
- Tesirli bir uyku için, düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar, reaksiyon terapisi, geleneksel biyolojik reaksiyon terapisi ve dijital frekans sentezi biyomimetik dalga kullanır.
- Serebellar fastigial çekirdeği doğrudan talamus ve hipotalamusa yansıtır ve fastigial çekirdeğin elektriksel uyarımı, değiştirilmiş alandaki nöronların aktivasyonuna neden olur.
- Talamus, hipotalamus, talamik korteks yoluyla, serebral korteks ile bağlantı kurmak için; aktive Merkezi sinir sistemi, beyin sinir hücrelerinin membran potansiyelinin stabilitesini artıran ve beynin uyarılabilirliğini azaltan, uyku fonksiyonunu iyileştiren ve geliştiren, uykusuzluğu tedavi etmek için FNS'yi kullanan, sinirin iç ortamını stabilize eden kaynak, sinir tarafından korunur.
- Beyin uyarılabilirliğinin artmasından kaynaklanan uyku bozukluğunu iyileştirebilir. Uykusuzluğun ilaçsız tedavisinin hedefine ulaşmak için uyku ve uyanıklık ritmini düzenler.

Ürün Uygulama Kapsamı

- Migren basıncı, yüksek çalışma basıncı, kaygı ve uykusuzluk çeken yetişkinler için uygun olan, baskıyı ve uykuyu hafifletmek için kullanılan elektronik bir alettir.

Ürün Özellikleri

- Ergonomik tasarıma göre bilimseldir ve kafa eğrisine uygundur.
- Dahili polimer lityum pil için güvenli ve güvenilir enerjiyi şarj etmek ve depolamak için standart V8 arayüzü kullanılmıştır.
- Düşük frekanslı nabız, başın trigeminal sinir sisteminde sinir uyarımını iletmek, migreni ve uykuyu rahatlatmak için kullanılır.
- Üç çalışma modunun farklı gücü vardır ve kendi ihtiyaçlarına göre seçilebilir.
- Takmak basit ve kullanışlıdır ve herhangi bir zamanda takılabilir veya çıkarılabilir.

Ürün Parametreleri

- Ürün Modeli: 90'lı zamanlar.
- Ürün Materyali: ABS + PC
- Ürün Ağırlığı: 60g.
- Şarj Voltajı: 5v1a
- Pil: 250mah / 3.7V
- Şarj Süresi: 1-2 saatte tam dolum.
- Güç Kullanım Süresi: Yaklaşık 20 dakika. (Saatte 15 dakika)

Şarj fonksiyonu açıklaması

- Adaptörden veya bilgisayar USB arayüzünden DC5V çıkışını şarj USB kablosu aracılığıyla şarj girişi V8 arayüzüne bağlayın, Gösterge yandığında şarj oluyor demektir. Tamamen şarj olduğunda, gösterge uzun süre yanar.

Ürün Kullanımı

Açma: Güç düğmesine basın ve basılı tutun.

1. **Mod (Uyku) :** Açıldıktan sonra tekrar basıp basılı tuttunuz.
2. **Mod (Basınç Azaltma):** Birinci mod dan sonra tekrar basıp basılı tuttunuz.
3. **Mod (Rahatlama):** İkinci mod dan sonra tekrar basıp basılı tuttunuz.

Kapama : Üçüncü mod dan sonra tekrar basıp basılı tuttunuz.



Gösterge Işıkları 3 bölmeden oluşur
Kullanım Durumu : Üç bölüm ışığı
yanıyor.

Şarj Olurken: Işıklar yanıp söner.
Tam şarj olduğunda gösterge ışığı her
zaman açıktır.

Üç çizgi bölümü farklı elektrik miktarlarını
temsil eder.

- 1.Bölüm: %1 - %30
- 2.Bölüm: %31 - %75
- 3.Bölüm: %76 - %100

Not: 15 dakikalık çalışmadan sonra otomatik olarak kapanacaktır. Kullanmaya devam etmek istiyorsanız, tekrar başlatma basmanız gerekir.

Kullanım Adımları:

- **Birinci Adım:**

Elektrot parçasını çıkarın, elektrot parçasını aletin dişi tokasına takın ve elektrot parçasının koruyucu filmi soyun. (Lütfen koruyucu filmi düzgün tutun.)

- **İkinci Adım:**

Alnınızı suyla ıslatın (çok önemli) ve taktıktan sonra ürünün kenarını kaşlarla aynı hizada tutun.

- **Üçüncü Adım:**

Akupunktur noktalarına etkili bir şekilde masaj yapmak için ürünü doğru yere takın. Ürün etkinliği, takıldığı yere bağlıdır. (Önemli nokta)

- **Dördüncü Adım:**

Başlattıktan sonra ihtiyaca göre gerekli modu seçin.

- **Beşinci Adım:**

Kullandıktan sonra cihazı çıkarın ve koruyucu filmi elektrot parçasına yapıştırın ve serin, kuru bir yere koyun.

Not: Elektrot parçası bir sarf (tüketim) malzemesidir ve etkinliği, kullanım sürelerinin artmasıyla kademeli olarak azalır. Lütfen zamanında değiştirin.

Sık Sorulan Sorular

- S: Elektrik darbesi işlevini kullanırken alın derisi neden karıncalanıyor?
- C: Karıncalanmanın nedeni, kullanıcının cildinin kuru olmasıdır, elektrot parçası, elektrik darbesi işlevinin rahatsızlığı için alın cildine tam olarak takılmamıştır, aletin hareket etmesi için alın derisinin ıslak bir havluyla ıslatılması önerilir. Tamamen alına bağlı, Elektrik darbe yoğunluğu önce zayıf, sonra güçlü olmalı ve yavaş yavaş uyum sağlamalıdır. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, masaj için diğer modları seçebilirsiniz.
- S: Alın bölgesindeki deride neden kızarıklık olur?
- Cevap: Elektrik darbesi işlevini kullandıktan sonra alındaki kızarıklığın nedeni cildinizin kuru olması veya cihaz üzerindeki elektrot parçasının cilde tam olarak takılmamasıdır. Kullanırken alın ile kaş arasındaki cildin ıslak bir havlu ile ıslatılması tavsiye edilir. Elektrot tamamen alın derisine takılır. Döküntü genellikle 2 gün sonra kaybolur.

Aletin Çıkarılması ve Saklanması

- Aletin varsayılan çalışma süresi 15 dakikadır ve çalışmadan sonra otomatik olarak kapanacaktır. Midway işlemi durumunda cihazı çıkarırken, önce cihazı kapatmak, ardından cihazı çıkarmak ve son olarak elektrot parçasının koruyucu filmini yapıştırmak gerekir. (kişisel kullanım için, çıkarmak gerekli değildir)
- Cihazı ambalaj Blister kutusuna koyun. Elektrot parçası koruyucu bir filmle yapıştırıldıktan sonra serin bir yerde saklayın. Dehidrasyon nedeniyle deformasyonu önlemek için elektrotları kuru bir yere maruz bırakmayın.

Dikkat Edilmesi Gereken Kontrendikasyonlar

- Kalp hastalığı, şiddetli ağrı, hamilelik, anormal tansiyon, duş veya terleme durumlarında dikkatli kullanınız.
- Yakın zamanda olan ,büyük beyin veya yüz travmasından sonra kullanmayınız.
- Alındaki elektrotun uygulama yerinde cilt aşınması.
- Araba sürerken kullanmayın.
- Ani, olağandışı bir baş ağrısı olan akut bir baş ağrınız varsa uyku cihazını kullanamazsınız. Baş ağrısı proksimalden geliyorsa veya olağandışı bir yapıya sahipse, zaman içinde bir doktora görünmeniz gerektiğini vurgularız.

Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

- Kalp pili, yapay kalp ve akciğer gibi diğer tıbbi elektronik aletlerle aynı anda kullanmayınız. Tıbbi elektronik ekipmanınızı ömür boyu koruyun, aksi takdirde tehlikeye yol açacaktır. Hasta aynı anda yüksek frekanslı cerrahi cihazı kullanıyorsa, aleti hazırlarken aletin elektrotunda yanık meydana gelebilir ve alet de hasar görebilir. Cihaz, kısa dalga veya mikrodalga işlem ekipmanının (1 metre) yakınında kullanılıyorsa, cihazın çıkışı iyi durumda olmayabilir.
- Hamile kadınlar, hassas cilt, kalp hastalığı, anormal kan basıncı, kötü huylu tümör, serebrovasküler hastalık, akut rahatsızlığı olan hastalar veya doktor tarafından tedavi gören diğer kişiler bu ürünü kullanmadan önce bir doktora danışmalıdır.
- Banyo yapmak yasaktır.
- Bilincini ifade etme yeteneği olmayan çocuklar veya akli dengesi yerinde olmayan insanlar için kullanmayın.
- Deri algılama bozukluğu olan hastalarda kullanılması yasaktır.
- Kullanım sırasında ürün taşınırken veya konumu değiştirilirken kullanımdan önce kapatılmalıdır, aksi halde güçlü bir stimülasyon meydana gelir.
- Arızayı, çarpışmayı ve su girişini önlemek için ürünü izinsiz sökmek veya monte etmek yasaktır.
- Ürünü su ile yıkamak yasaktır.

Garanti Belgesi

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı – üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya ithalatçısı- üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Ürün ve Firma Bilgileri

- Marka : Bellista
- Model: Relax90s
- Cinsi: Düşük Frekans Uyku ve Basınç Düzenleyici
- Azami Tamir Süresi: 30 iş günü
- Garanti Süresi : 1 Yıl
- Firma: Norm Natural Alte.Terapi Gıda Tak.Ve Koz.Ürü.San.Tic.Ltd.Şti.
- Adres: Fındıklı mah. Selvi sok. No:9/A Maltepe / İstanbul / Turkey
- Tel: 0216 660 06 24
- E-Posta: info@normway.com.tr

Hayatımıza *değer katan* Markalar



Alkali & Antioksidan Su



Ana Grup Marka

BEJLISTA

Kişisel Terapi Cihazları



Doğal Temizlik Ürünleri

MESCARE

Doğal Kişisel Bakım

NGUNAIR

Ozon & Negatif İyon Cih.

jibell®

Yeşim Taşı Aksesuar



Ücretsiz Tanıtım Mağazaları



Alkali & Antioksidan Su



NormBazaar

E-ticaret Mağazası



SAVGU

Gıda Takviyeleri



help to win

Network Marketing



/normway.turkiye



/normway.turkiye



/normway.turkiye



/Normway Türkiye

www.normway.com.tr